

# Dermalize Pro Second Skin

## Tragedauer & Anwendung – Kompaktleitfaden

### Grundprinzip

Die Folie schützt das frische Tattoo vor Reibung, Bakterien und Austrocknung und fördert eine schnellere, saubere Heilung ohne starke Krustenbildung.

### Standard-Protokoll

Variante A (Empfohlen): • Erste Folie: 8–24 Stunden tragen. Bei starker Flüssigkeit frühzeitig wechseln. • Zweite Folie: 3–5 Tage durchgehend tragen (max. 5–6 Tage am Stück). Variante B (eine Folie 3–5 Tage): Möglich bei geringer Flüssigkeit, sauberer Haftung und kleinen bis mittleren Tattoos. Die ersten 24 Stunden sind entscheidend.

### Sofort entfernen bei

• Ablösung an den Rändern • Starkem Druck, pochendem Schmerz oder zunehmender Schwellung • Trüber Flüssigkeit oder Geruch • Brennen oder allergischer Reaktion Danach: Reinigen und auf klassische Pflege umstellen.

### Empfehlung nach Größe

• Klein (bis 5 cm): 3–5 Tage eine Folie möglich • Mittel (5–15 cm): Erste Folie 24h, danach neue für 3–5 Tage • Groß (ab 15 cm): Wechsel nach 8–24h empfohlen

### Empfehlung nach Körperzone

Ruhige Zonen (Oberarm außen, Oberschenkel außen, Wade): → 3–5 Tage möglich Bewegungszonen (Handgelenk, Ellenbeuge, Knie, Hals, Schulter): → Wechsel nach 24h empfohlen Reibungs- & Druckzonen (Lendenbereich, Hüfte, Fußknöchel, Rippen): → Meist Wechsel nach 24h sinnvoll

### Entfernung der Folie

Nicht trocken abziehen. Unter warmem Wasser langsam parallel zur Haut abrollen.